

Aurimax spray do uszu

Instrukcja używania

Spis treści:

1. Co to jest **Aurimax** i w jakim celu się go stosuje?
2. Ważne informacje przed zastosowaniem.
3. Jak stosować **Aurimax**?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać **Aurimax**?
6. Pozostałe informacje.

Skład: olej z oliwek oczyszczony, glicerol, kompleks kwasu glicyretynowego, totarol, olejek geraniowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek cytrynowy, olejek z oregano, olejek lawendowy, olejek miętowy, olejek z rozmarynu lekarskiego, wyciąg z gorzknika kanadyjskiego.

1) Co to jest AURIMAX i w jakim celu się go stosuje?

Aurimax - jest to wyrób medyczny klasy I stosowany jako wilgotna bariera ochronna przed szkodliwymi wpływami środowiska, nawilżająca i kojąca skórę kanału słuchowego. Aurimax jest również zalecany w utrzymaniu higieny aparatu słuchowego ucha zewnętrznego dzieci i dorosłych.

Aurimax

- wspomaga leczenie zapaleń ucha,
- ogranicza obrzęk przewodu słuchowego i ma działanie ściągające.

Aurimax

- zmiękcza zalegająca woskowinę (dzięki czemu można ją łatwo usunąć) i zapobiega jej twardnieniu,
- wspomaga utrzymanie optymalnej wilgotności,
- powala utrzymać higienę uszu.

2) Ważne informacje przed zastosowaniem.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Preparatu **Aurimax** nie należy stosować, jeśli:

- opakowanie zostało uszkodzone;
- występuje perforacja błony bębenkowej ucha (np. w przypadku przewlekłego zapalenia ucha środkowego);
- stwierdzono wcześniej uczulenie na którykolwiek ze składników wyrobu;
- upłynął termin ważności wydrukowany na opakowaniu;
- pacjent jest bezpośrednio po operacji lub zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym w obrębie ucha;
- u dzieci poniżej 3 roku życia.

Stosowanie z innymi produktami leczniczymi/ wyrobami medycznymi



Nie stwierdzono interakcji z innymi produktami leczniczymi/ wyrobami medycznymi. Po zastosowaniu spray'u nie zaleca się stosowania żadnych innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kropli do uszu przez okres co najmniej 30 minut.

3) Jak stosować Aurimax?


Przed pierwszym użyciem wstrząsając butelką przez co najmniej 5 sekund. Dzięki temu powstanie jednorodna zawiesina. Następnie 3-4-krotnie naciskając dozownik, do czasu aż nie dojdzie do uwolnienia spray'u (rysunek A). Podczas naciskania trzymać aplikator skierowany od siebie. Taka procedura przygotowuje system dawkowania do pierwszego użycia.

W celu osiągnięcia najlepszego wyniku należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

- Płynny spray do uszu **Aurimax** stosować wyłącznie wewnątrz, miejscowo do ucha.
- Wstrząsać dokładnie buteleczką przez ok. 5 sekund, do czasu uzyskania jednorodnej zawiesiny.
- W celu użycia spray'u, delikatnie pociągnąć małżowinę uszną w górę i w tył (rysunek B).

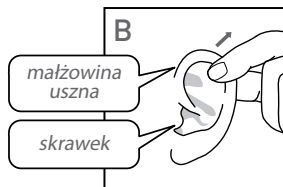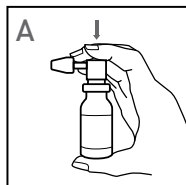

- Po wprowadzeniu aplikatora do ucha trzymać buteleczkę w pozycji pionowej i nacisnąć dozownik 1-2 razy (rycina C).
- Po aplikacji spray'u wymasować od zewnętrznej strony przednią część kanału słuchowego (skrawek).
- Taką samą procedurę powtórzyć w przypadku drugiego ucha.
- Po zastosowaniu zdjąć aplikator i przepłukać go gorącą wodą.
- Po wyschnięciu nałożyć końcówkę aplikatora na dozownik.

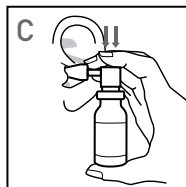

Dawkowanie

Dzieci od 3 do 12 roku życia: 1 dawka do każdego ucha 2-3 razy dziennie. Stosować wyłącznie pod nadzorem dorosłych! Jeśli po upływie 14 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli: 1 dawka do każdego ucha 3-4 razy dziennie. Jeśli po upływie 14 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Aurimax zawiera 200 pojedynczych dawek.

4) Możliwe działania niepożądane.

Wyrób medyczny **Aurimax** jest dobrze tolerowany i nie są znane żadne działania niepożądane po jego zastosowaniu. W razie wystąpienia objawów alergii lub innych działań niepożądanych należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Wyrób medyczny **Aurimax** należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją używania.

5) Jak przechowywać Aurimax?

Aurimax przechowywać:

- w suchym miejscu, w temperaturze od 15° C do 25° C w pozycji pionowej;
- chronić przed mrozem i nie przechowywać w lodówce;
- chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego;
- w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po wykorzystaniu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

6) Inne informacje:

Aurimax to wyrób medyczny I klasy.

Opakowanie

Pojemnik wielodawkowy o objętości 10 ml netto, zawierający 200 pojedynczych dawek. Pojemnik nie jest pod ciśnieniem. Obecność nierozpuszczonych cząstek to naturalna cecha produktu i nie oznacza jego wady.

Tanacetum s.r.o.




Švabinského 1700/4, 702 00 Moravská Ostrava, Česká republika

Dystrybutor w Polsce:

Smart Pharma sp. z o.o.

Złotniki, ul. Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las, Tel +48 61 659 38 65, www.smartpharma.com.pl

Wyjaśnienie zastosowanych symboli

	zajrzyj do instrukcji używania		ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania		numer serii
	wytwórca		chronić przed słońcem		użyć przed końcem
	ostrzeżenie		nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		
	znak zgodności CE				