





BEZ BÓLU

PRZY ZMIANIE OPATRUNKU

„Jeśli podczas zmiany opatrunku nie jest stosowana odpowiednia technika, wierzchnia warstwa skóry jest usuwana wraz z przylegającym do niej opatrunkiem, co nie tylko narusza integralność skóry, ale powoduje ból, stwarza ryzyko infekcji, opóźnia proces zdrowienia pacjentów i obniża jakość ich życia.”

*Impact of adhesive surgical tape and wound dressings on the skin, with reference to skin stripping.
 Prof. Keith Cutting, Buckinghamshire New University.*

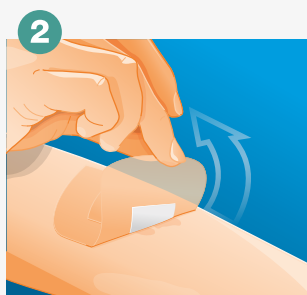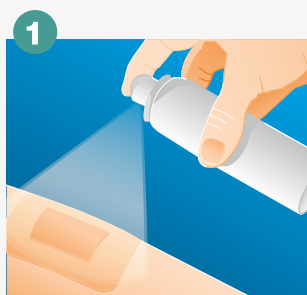


Opatrunki na włókninie

1. Nanieść na wierzch opatrunku i odczekać kilka sekund.
2. Delikatnie usunąć opatrunek (ewentualnie nanieść kolejną dawkę preparatu). Obszar jest gotowy do kolejnej aplikacji.



Plastry wodoodporne, kinesiotaping, plastry nikotynowe i inne

1. Odkleić delikatnie róg opatrunku. Nanieść preparat pod krawędź plastra.
2. Następnie delikatnie odklejać plaster, aplikując jednocześnie preparat. Obszar jest gotowy do kolejnej aplikacji.

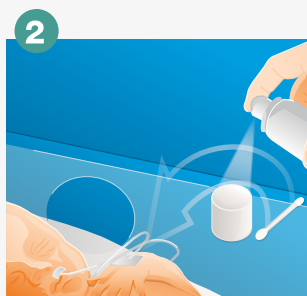

Plastry u noworodków lub w okolicach oczu

1. Nanieść niewielką ilość do nasadki zabezpieczającej produkt.
2. Nasączonym patyczkiem higienicznym nanieść preparat na opatrunek, odczekać kilka sekund i usunąć go delikatnie.